

Oggetto: Chenpen® - informazioni e chiarimenti riguardanti lo stantuffo dell'indicatore di iniezione

Gentile Signora/Signore,

in riferimento al medicinale Chenpen® 150 microgrammi, numeri di lotto 31X, 5F2, 6N3, 8R1, e Chenpen 300 microgrammi, numeri di lotto 34X, 56Y, 8G7, 5P4, 2W2, si riportano nella presente alcuni chiarimenti utili ai fini del corretto utilizzo del farmaco.


Per quanto riguarda lo stantuffo dell'indicatore di iniezione (vedi immagine e spiegazione 1-A), in tutti i casi in cui questo presenti un colore **«bianco-rosato»** (dovuto allo strato di plastica bianca sovrastampato), l'autoiniettore **potrà essere utilizzato**.

Qualora invece lo stantuffo dell'indicatore di iniezione appaia di colore **rosso brillante** (vedi immagine e spiegazione 1-B), **questo non dovrà essere in nessun caso utilizzato**, in quantol'autoiniettore è già stato attivato.

Per quanto riguarda la finestrella con otturatore girevole (vedi immagine e spiegazione 1-C), questa permette di controllare il colore della soluzione; perché il prodotto sia utilizzabile tale soluzione deve essere trasparente.

Unacolorazione rosa è invece segnale che l'adrenalina si è degradata e che l'autoiniettore non deve essere in nessun caso utilizzato ed è dunque necessario sostituirlo.

Nel riquadro di seguito sono riportati degli esempi: uno di iniettore NON utilizzabile (1-B e 1-D) e un altro di iniettore utilizzabile (1-A e 1-C)

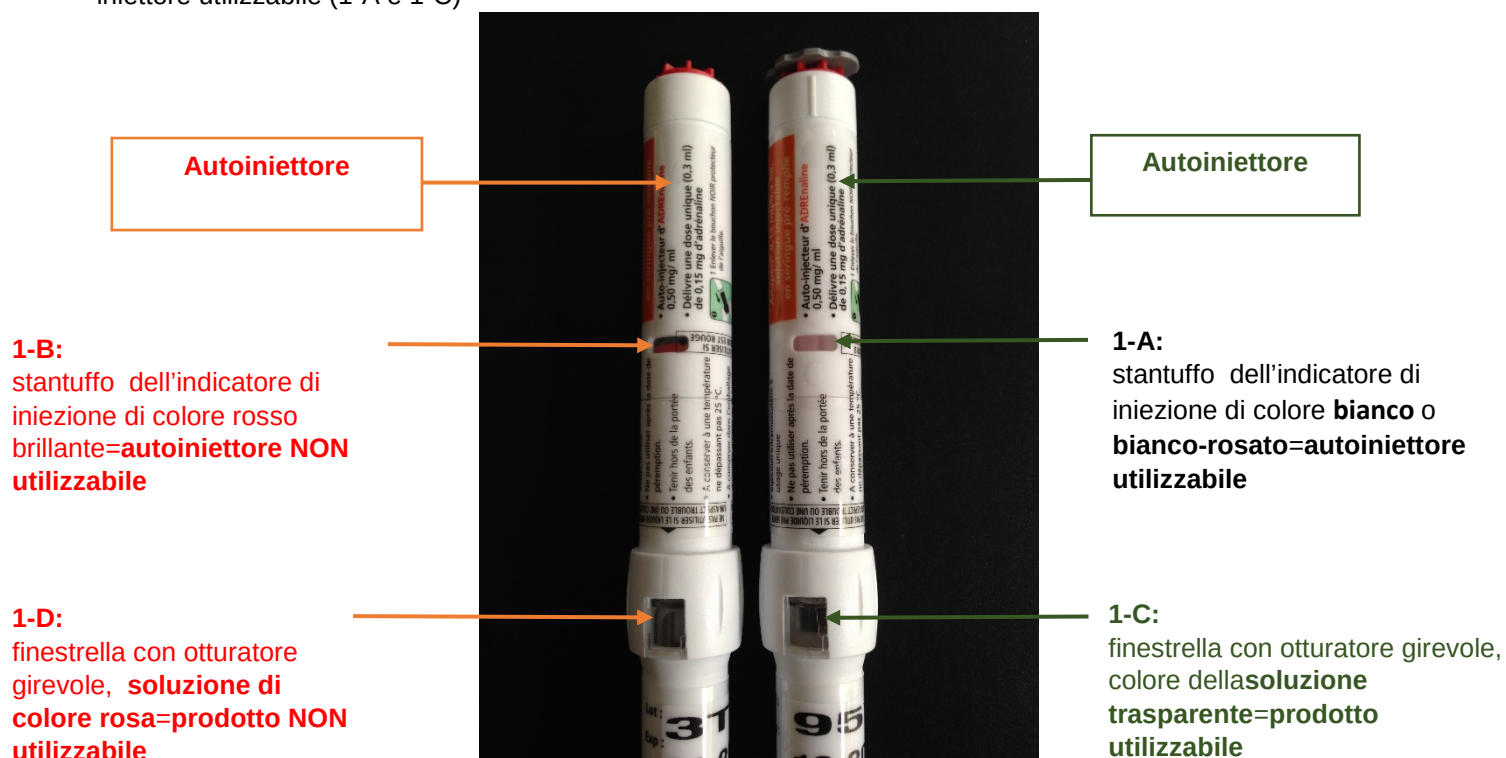

Si ricorda sempre di leggere attentamente le istruzioni riportate nel foglio illustrativo per il corretto utilizzo dell'autoiniettore CHENPEN®.